

Hold-n-Place®



Επίθεμα στερέωσης σωλήνων
πολλαπλών χρήσεων

Περιγραφή προϊόντος

Φιλικό προς το δέρμα, αναπνέον, αυτοκόλλητο επίθεμα για τη στερέωση διαφόρων ειδών καθετήρων και σωλήνων από 12 fr έως 40 fr. Παρέχει δυνατότητα στερέωσης με ή χωρίς αυτοκόλλητο γύρω από τον σωλήνα.

Οδηγίες εφαρμογής

1. Καθαρίστε και προετοιμάστε την περιοχή εφαρμογής. Εφαρμόστε σε καθαρό, στεγνό δέρμα.
2. Ανοίξτε το Hold-n-Place της Dale, έτσι ώστε τα προστατευτικά φύλλα των βάσεων να είναι επίπεδα και η κεντρική γλωττίδα να είναι όρθια. **(A)**
3. Αφαιρέστε τα προστατευτικά φύλλα από τις βάσεις για να εκτεθεί η αυτοκόλλητη πλευρά, και εφαρμόστε τις στο δέρμα. **(A)**
4. Αφήστε το προστατευτικό φύλλο της κεντρικής γλωττίδας στη θέση του για στερέωση χωρίς αυτοκόλλητο γύρω από τον σωλήνα. Ή αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο της γλωττίδας για να αποκαλύψετε την αυτοκόλλητη πλευρά για τη στερέωση του σωλήνα. **(A)**
5. Τοποθετήστε τον σωλήνα κάτω από την κεντρική γλωττίδα, τυλίξτε γερά τη γλωττίδα γύρω από τον σωλήνα και συνδέστε το τραχύ άκρο της γλωττίδας με το μαλακό τμήμα της βάσης. **(B)**
6. Για να στερεώσετε καθετήρα Foley, τοποθετήστε τη θύρα σχήματος Y του εγγύς άκρου του καθετήρα Foley πάνω στην κεντρική γλωττίδα και διπλώστε από πάνω τη γλωττίδα για να τον στερεώσετε. **(C)**

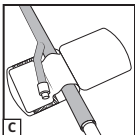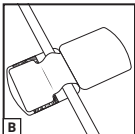

Πρόσθετα οφέλη

- Στερεώνει πολλά είδη σωλήνων, όπως: θωρακικοί σωλήνες, καθεήρες Jackson-Pratt, καθεήρες Foley, σωλήνες παροχέτευσης, σωλήνες PEG και καθεήρες πολλαπλών θυρών.
- Διαθέτει επιφάνεια πάνω στην οποία μπορείτε να γράψετε.
- Διατηρείται έως και 7 ημέρες.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας www.dalemed.com/patents

Τα Dale και Hold-n-Place είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

