



Hold-n-Place® Supporto per Tubi Multiuso

Descrizione del Prodotto

Questo supporto per tubi delicato sulla pelle, traspirante e a risvolto adesivo fissa in posizione un'ampia varietà di cateteri e tubi da 12 a 40 fr. Adatto al fissaggio adesivo o non adesivo attorno al tubo.

Istruzioni per l'Uso

1. Pulire e preparare l'area di applicazione. Applicare sulla pelle pulita e asciutta.
2. Aprire il supporto Dale Hold-n-Place facendo sì che le coperture della base siano ben distese e la linguetta centrale eretta. **(A)**
3. Rimuovere le coperture della base, esporre la superficie adesiva ed applicarla sulla pelle. **(A)**
4. Lasciare in posizione la copertura della linguetta centrale per ottenere un fissaggio non adesivo attorno al tubo **OPPURE** rimuovere la copertura per esporre l'adesivo del tubo. **(A)**
5. Disporre il tubo sulla parte inferiore della linguetta centrale ed avvolgere saldamente tale linguetta attorno al tubo, unendo la sezione a strappo della base. **(B)**
6. Per fissare in posizione un catetere Foley, disporre la porta a Y dell'estremità prossimale del catetere sulla linguetta centrale e piegare la linguetta. **(C)**

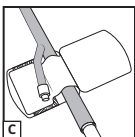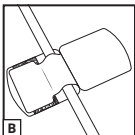

Ulteriori Vantaggi

- Fissa un'ampia gamma di tubi, compresi i tubi toracici, i tubi Jackson-Pratt, i cateteri Foley, i tubi di drenaggio ed i cateteri multiporta.
- Superficie scrivibile.
- Fino a 7 giorni di durata.

Monopaziente. Monouso.

Per un video applicativo, visitare www.dalemed.com

I prodotti medicali Dale sono disponibili presso l'ospedale o il fornitore sanitario preferito.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Brevetto www.dalemed.com/patents

Dale e Hold-n-Place sono marchi di fabbrica di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nella UE e nel Regno Unito.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

