

## UltraGrip<sup>™</sup>

### Επίθεμα Στερέωσης Ρινοαστρικού Σωλήνα

#### Οδηγίες εφαρμογής

1. Αφού τοποθετήσετε τον σωλήνα στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι τόσο η μύτη όσο και ο ΡΓ σωλήνας είναι καθαρά και στεγνά.
2. Καθαρίστε τη μύτη και την περιοχή γύρω από αυτή με ένα καθαρό πανί που το έχετε υγράνει με ζεστό, καθαρό νερό βρύσης (χωρίς σαπούνι). Στεγνώστε την περιοχή αμέσως μετά τον καθαρισμό με μια καθαρή στεγνή πετσέτα. (Μη χρησιμοποιείτε αλκοόλη σε αυτή την περιοχή εφαρμογής) Η αλκοόλη θα στεγνώσει τον ιστό και μπορεί να προκαλέσει μικρορωγμές στο δέρμα. (A)
3. Αποκολλήστε την προστατευτική επένδυση από το τμήμα ρινικού επιθέματος της στερέωσης.
4. Τοποθετήστε, ευθυγραμμίστε και εφαρμόστε το ρινικό επίθεμα στην πλευρά της μύτης όπου εξέρχεται ο σωλήνας, διατηρώντας τον σωλήνα στο κέντρο της μύτης και ευθυγραμμίζοντας τον σωλήνα στο κέντρο του αφρώδους επιθέματος της ράχης της μύτης. Το επίθεμα στερέωσης ΡΓ σωλήνα θα πρέπει πάντα να ευθυγραμμίζεται με όποιο ρουθούνι χρησιμοποιείται από τον ΡΓ σωλήνα. Η μονή μακριά ταινία θα πρέπει να είναι παράλληλη προς τον σωλήνα. (B)
5. Αποκολλήστε την προστατευτική επένδυση από τη μονή μακριά ταινία και αρχίστε να τυλίγετε τη μονή μακριά ταινία σπειροειδώς, ώστε ο σωλήνας να βρίσκεται στο κέντρο του ρουθουνιού. (C)
6. Αλλάξτε το επίθεμα στερέωσης του σωλήνα μετά από 3 ημέρες ή συντομότερα, εάν είναι απαραίτητο.

#### Αφαίρεση

Για να αφαιρέσετε το επίθεμα στερέωσης από τον σωλήνα, απλώς τραβήξτε προς τα πίσω τη μη αυτοκόλλητη άκρη στο τέλος της μονής μακριάς ταινίας.

Συνεχίστε να τραβάτε προσεκτικά τα επίθεμα στερέωσης του σωλήνα προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε από τη μύτη του ασθενή.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Το Dale είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το ΗΒ.

Το UltraGrip είναι εμπορικό σήμα της Dale Medical Products, Inc.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

