

UltraGrip[™]

Supporto per Sondino Nasogastrico

Istruzioni per l'Applicazione

1. Con il sondino in posizione, verificare che sondino e naso siano puliti e asciutti.
2. Pulire il naso e l'area circostante con una salvietta pulita, inumidita con acqua corrente calda e pulita (*senza sapone*). Asciugare l'area immediatamente dopo la pulizia con una salvietta pulita e asciutta. (*Non applicare alcol su quest'area*) pena la disidratazione dei tessuti e la microfessurazione della cute (A).
3. Separare il rivestimento dalla parte del tampone nasale del supporto.
4. Posizionare, allineare e applicare il tampone sul lato del naso dal quale fuoriesce il sondino, mantenendo quest'ultimo al centro della narice e allineato al centro del tampone nasale imbottito. Il supporto del sondino deve essere sempre allineato con la narice utilizzata e la linguetta lunga parallela al sondino (B).
5. Separare il rivestimento dalla linguetta lunga e avvolgere quest'ultima sul sondino, centrandolo sulla narice (C).
6. Il supporto va cambiato ogni tre giorni o con maggiore frequenza se necessario.

Rimozione

Per rimuovere il supporto dal sondino, retrarre semplicemente la punta non aderente della linguetta lunga.

Continuare a svolgere delicatamente verso l'alto il supporto, staccandolo dal sondino e dal naso del paziente.

Monopaziente. Monouso.




Visitare www.dalemed.com per un video esemplificativo.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore medico-ospedaliero preferito.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Dale è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'Unione Europea e nel Regno Unito.

UltraGrip è un marchio di fabbrica di Dale Medical Products, Inc.

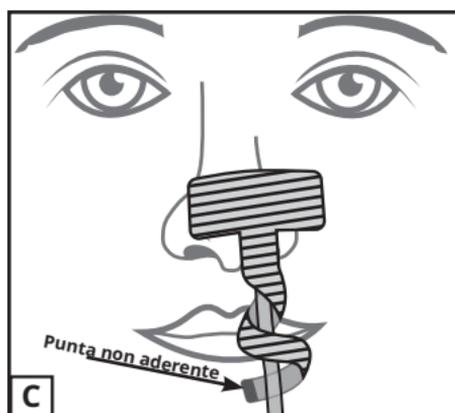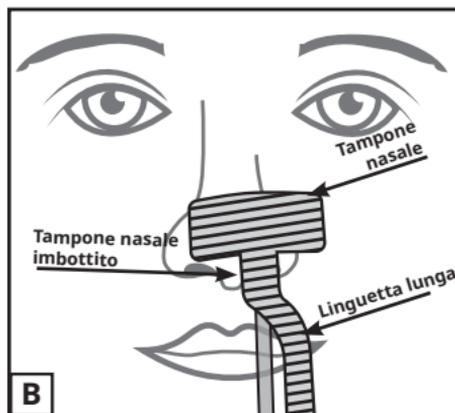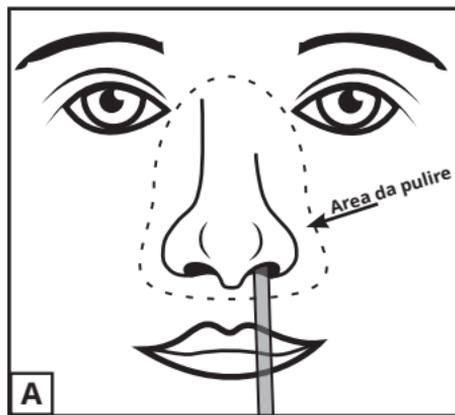

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

