


## Scrape-n-Suction™ Καθαριστής γλώσσας

### Περιγραφή προϊόντος

Απομακρύνει τα βακτήρια και τις τοξίνες στο βιοφίλμ της γλώσσας.

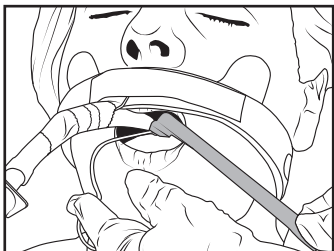

### Οδηγίες Εφαρμογής

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αμέσως μετά τη συνήθη στοματική φροντίδα.

1. Συνδέστε το κουμπωτό άκρο του ξέστρου στη σωλήνωση αναρρόφησης.
2. Ρυθμίστε την αναρρόφηση στη **συνιστώμενη πίεση των 100 mmHg**. Αυξήστε την πίεση αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες για την αφαίρεση πυκνού ή προσκολλημένου βιοϋμενίου. **Μην υπερβαίνετε τα 150 mmHg**.
3. Τοποθετήστε προσεκτικά την κεφαλή του ξέστρου κοντά στο πίσω μέρος της γλώσσας.
4. Σταδιακά, ασκώντας ελαφριά πίεση, τραβήξτε το ξέστρο προς την άκρη της γλώσσας, αφαιρώντας το βιοϋμένιο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι να καθαριστούν όλες οι περιοχές της γλώσσας.
6. Απορρίψτε το ξέστρο μετά τη χρήση.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Το Dale είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το ΗΒ.

Το Scrape-n-Suction είναι εμπορικό σήμα της Dale Medical Products, Inc.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

