


## Scrape-n-Suction<sup>™</sup> Pulitore della Lingua

### Descrizione del Prodotto

Rimuove i batteri e le tossine presenti nel biofilm della lingua.

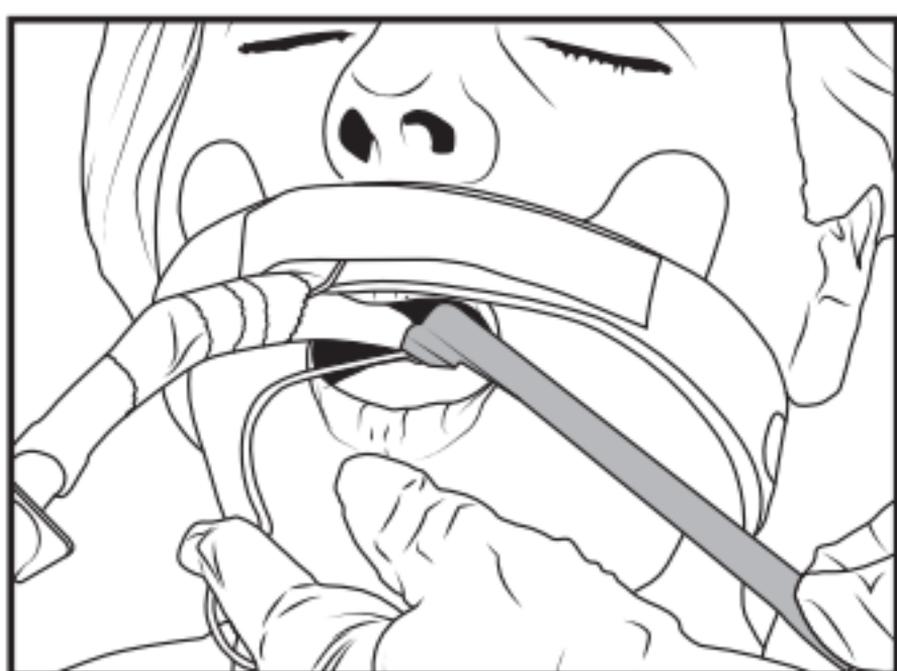

### Istruzioni per l'Applicazione

**Per ottenere risultati ottimali, usare subito dopo la prassi standard di igiene orale.**

1. Collegare l'estremità spinata del pulitore al tubo di aspirazione.
2. Impostare l'aspirazione sul livello **consigliato di 100 mmHg**. Aumentare l'aspirazione quanto basta per rimuovere il biofilm ispessito o incrostato. **Non superare i 150 mmHg.**
3. Appoggiare delicatamente la testina del raschietto vicino alla radice della lingua.
4. Esercitando una leggera pressione, far scorrere a poco a poco il pulitore in direzione della punta della lingua, rimuovendo il biofilm.
5. Ripetere i passi 3 e 4 finché non vengono pulite tutte le superfici della lingua.
6. Smaltire il pulitore dopo l'uso.

Monopaziente. Monouso.

Visitare [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) per un video esemplificativo.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore medico-ospedaliero preferito.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Brevetto [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'Unione Europea e nel Regno Unito.

Scrape-n-Suction è un marchio di fabbrica di Dale Medical Products, Inc.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

