


## Υποδοχές σωλήνα τραχειοστομίας

### Οδηγίες εφαρμογής

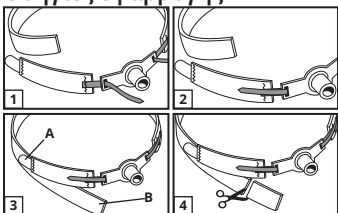

1. Περάστε τα μακρά και στενά συνδετικά πτερύγια μέσα από τις φλάντζες της πλάκας τραχειοστομίας.
2. Φέρτε τα πτερύγια προς τα πίσω, πάνω από τη φλάντζα, και συνδέστε τα στο περιλαίμιο.
3. Στερεώστε το συνδετικό πτερύγιο του βραχέος τμήματος (A) στο μακρύ τμήμα (B) του περιλαίμιου. Ρυθμίστε για να πετύχετε το κατάλληλο μήκος ή τη σωστή συμπίεση.
4. Κόψτε το περίσσιο υλικό (**μόνο το B**) για το κατάλληλο μήκος.

### Προσοχή

Χρήση σε επιτηρούμενα κέντρα φροντίδας μόνο. Παρακολουθείτε για να αποφύγετε την αθέλητη αποσύνδεση. Μην κόβετε τα συνδετικά πτερύγια.

Αλλάζετε την υποδοχή καθημερινά ή πιο συχνά όπως χρειάζεται. Αλλάξτε το αφού κάνει μπάνιο ο/η ασθενής.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Ευρεσιτεχνία [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Το Dale είναι σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

