


Supporti per Cannula Tracheostomica

Istruzioni per l'Applicazione

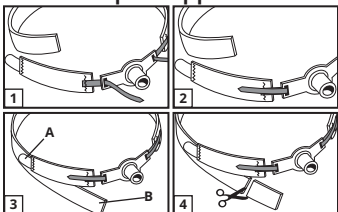

1. Far passare le linguette di aggancio lunghe e strette attraverso le flange poste sulla placca per tracheostomia.
2. Riportare le linguette sopra la flangia e farle aderire al collare.
3. Agganciare la linguetta del tratto più corto (A) allo spezzone più lungo del collare (B). Regolare secondo la lunghezza o compressione desiderata.
4. Rifilare il materiale in eccesso (solo B) in modo da ottenere la lunghezza desiderata.

Attenzione

Da utilizzare solo sotto il controllo di personale competente. Tenere sotto controllo per evitare che il dispositivo si sganci accidentalmente. Non ritagliare le linguette di aggancio.

Cambiare il supporto una volta al giorno o più spesso a seconda delle necessità. Cambiarlo dopo ogni bagno del paziente.

Monopaziente. Monouso

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il fornitore ospedaliero/sanitario preferito.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Brevetto www.dalemed.com/patents

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

