

Stabilock Endotracheális Cső-tartó Szalag

7,0-10,00 mm-es endotracheális tubusokhoz

Tartalom: 1 db - nyakpánt; 273 ragasztótálp

Alkalmazási Utasítások

1. Tisztítsa ki a csövet. Hagyja megszáradni.
2. Helyezze fel a ragasztós tartóaljzatot (A1-3). Kövesse a 273-as csomagoláson található utasításokat.
3. Nyomja a nyakszalagot az aljzat horgos részére, közben ügyeljen arra, hogy a cső csatornája egy vonalban legyen az endotracheális csővel. (B)

4. Nyissa fel a nyakszalag mindkét végén található rögzítőfüleket, majd tekerje a szalagot a beteg feje köré, közvetlenül a fül alatt. Rögzítse helyükre a füleket a nyakszalagon kívül. (C)

5. Rögzítse a csövet a csőcsatornában
 - tekerjen a cső köré erős ragasztószalagot egyszerűen olyan helyen, ahol a csatorna fedi a csövet;
 - nyomja le a csatornát a csőre;
 - tekerjen ragasztószalagot a cső és a csatorna köré. (D)

Alternatív rögzítési módszer:

- nyomja le a csatornát a csőre;
- tekerjen erős ragasztószalagot a cső és a csatorna köré. **A ragasztószalagot legalább 2,5 cm-rel a csatorna végén túl tekerje a csőre (D)**

6. A nyakszalag szilárdságát a rögzítőfülek szükség szerinti beigazításával biztosítsa.

Szükség szerint cserélje a ragasztószalagot.

Három nap múltán – illetve szükség szerint gyakrabban – cserélje le a tartóaljzatot.

Eltávolítás

A bőrtrauma elkerülésének érdekében óvatosan kell eltávolítani a ragasztószalagot.

A cső áthelyezése

Nyissa fel a rögzítőfüleket. Tartsa a ragasztós tartóaljzatot egy helyben, míg a nyakszalagot leválasztja az aljzatról. Helyezze át a csövet. A szalagot nyomja vissza a tartóaljzatra, majd újra rögzítse a füleket.

A bőr elfekélyesedésének vagy beszakadásának elkerülése érdekében mérje fel a beteg bőrének állapotát, valamint a beteg egészségügyi állapotát, mielőtt a tartószalagot felhelyezné. Naponta vagy ennél gyakrabban ellenőrizze a beteg bőrének állapotát.

A Dale **nyomatékosan javasolja az endotracheális cső gyakori áthelyezését** az ajkak, illetve az alattuk fekvő szövetek enyhíthetetlen nyomás következtében bekövetkező megsérülésének elkerülése érdekében.

A Dale **nyomatékosan javasolja a ventilátorcsövek kitámasztását**, a beteg arcára gyakorolt nyomás csökkentése érdekében.

Hasznos Ellenőrzőlista a Sikeres Alkalmazáshoz

- ✓ **Készítse elő** a bőrt minden alkalommal, amikor a ragasztós tartóaljzatot felhelyezi
- ✓ **Helyezze** a ragasztós tartóaljzatot közvetlenül az ajkak vonala fölé
- ✓ **Szoros spirálszalaggal tekerjen** erős ragasztószalagot a cső és a csatorna köré
- ✓ **Ügyeljen arra**, hogy a ragasztószalagot legalább 2,5 cm-re a csatornán túl tekerje fel
- ✓ **Gyengéd mozdulattal távolítsa el** a ragasztós tartóaljzatot, hogy a bőr sérülésének lehetőségét minimalizálja
- ✓ **Támaszsa ki** a ventilátorcsövet

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.





Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com/webhelyre.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórház-/gyógyászatokhoz-forgalmazóktól.

Nem természetes latex gumbiól készült.

Szabadalom www.dalemed.com/patents

A Dale a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban, az EU-ban és az Egyesült Királyságban.

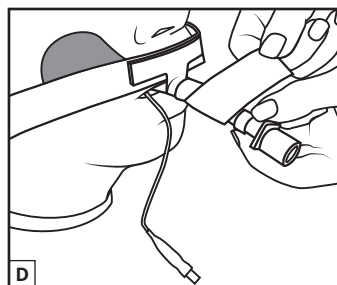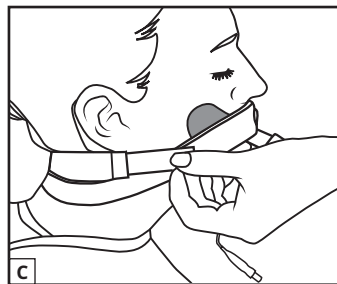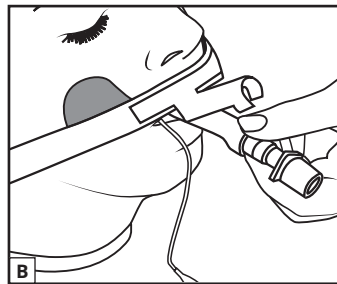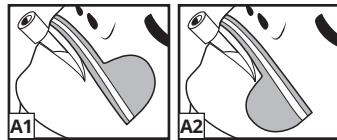

Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®

Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)