

Dale®

Stabilock

Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®

Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®

Medical Products

Stabilock

Holder for Trakealtube

passer til trakealtuber i størrelse 7,0–10,0 mm

Innhold: 1 stk. av hver: nakkerem, 273-kleplate

Påsettingsanvisninger

1. Rengjør tuben. La tørke.
 2. Sett på kleplate (A1-3). Følg anvisningene på 273-pakningen.
 3. Trykk nakkeremmen inn på krokdelen av kleplate, og påse at intubasjonskanalen rettes inn med trakealtuben (B).
 4. Åpne festeflikene i begge ender av nakkeremmen, og legg nakkeremmen rundt hodet, rett nedenfor ørene. Fest festeflikene til utsiden av nakkeremmen (C).
 5. Fest tuben i intubasjonskanalen
 - Vikle kraftig, selvklebende teip én gang rundt tuben der kanalen dekker tuben.
 - Trykk kanalen ned over tuben.
 - Vikle teip rundt tuben og kanalen (D)
- Alternativ teipemetode:
- Trykk kanalen inn på tuben.
 - Vikle kraftig, selvklebende teip stramt rundt tuben og kanalen. Vikle teip minst 2,5 cm forbi kanalens avslutning (D).
6. Påse at nakkeremmen sitter godt ved å justere festeflikene på nytt etter behov.

Bytt teip etter behov.

Bytt kleplate etter 3 dager, eller tidligere hvis det er nødvendig.

Fjerne Utstyret

Kleplate skal fjernes forsiktig for å unngå hudtraume.

Justere Tubens Posisjon

Åpne festeflikene. Hold kleplate nede mens du drar nakkeremmen av kleplate. Juster tubens posisjon. Trykk den ned i kleplate igjen, og fest festeflikene.

Forebygg sår og rifter i huden ved å evaluere pasientens hud og helsestilstand for påsetting. Overvåk daglig eller oftere.

Dale anbefaler å justere trakealtubens posisjon ofte for å forebygge trykkskader på lepper og underliggende vev.

Dale anbefaler på det sterkeste å støtte opp ventilasjonstuben for å redusere trykket mot pasientens ansikt.

Nyttig Sjekkliste for Vellykket Påsetting

- ✓ **Preparer** huden hver gang kleplate skal settes på.
- ✓ **Posisjoner** kleplate rett ovenfor leppelinjen.
- ✓ **Vikle kraftig, selvklebende teip stramt** rundt kanalen og tuben.
- ✓ **Sørg for** å vikle teip rundt tuben minst 2,5 cm forbi kanalen.
- ✓ **Fjern** kleplate forsiktig for å minimisere hudskade.
- ✓ **Støtt opp** ventilasjonstuben.

Til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Produsert uten naturgummilateks.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

