


## Αυτοκόλλητη βάση

### Οδηγίες εφαρμογής

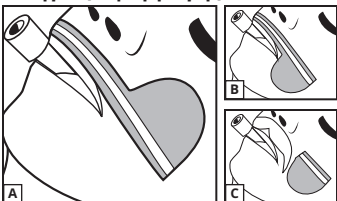

1. Εφαρμόστε προστατευτικό δέρματος.
2. Αφαιρέστε την προστατευτική επένδυση και τοποθετήστε την αυτοκόλλητη βάση στην επιθυμητή θέση **(A-C)**. Κόψτε την όπως απαιτείται.

Αλλάξτε τη βάση μετά από 3 ημέρες ή συντομότερα, εάν χρειάζεται.

Να παρακολουθείται καθημερινά ή συχνότερα.

### Αφαίρεση

Το αυτοκόλλητο θα πρέπει να αφαιρείται με προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το δέρμα.

Για να αποφευχθεί εξέλκωση ή εκδορές του δέρματος, εκτιμήστε την κατάσταση του δέρματος του ασθενή και την ιατρική του κατάσταση πριν από την εφαρμογή.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Το Dale είναι σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

