


## Base Adesiva

### Istruzioni per l'Applicazione

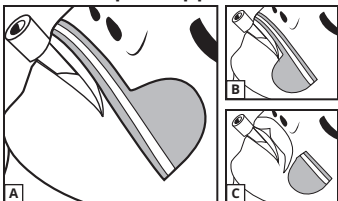

1. Applicare il preparato di protezione della pelle.
2. Rimuovere il rivestimento e posizionare opportunamente la base adesiva (**posizione A-C**). Rifilare secondo le necessità.

Cambiare base dopo 3 giorni o prima se necessario.

Monitorare ogni giorno o con maggiore frequenza.

### Rimozione

Rimuovere con cura l'adesivo in modo da evitare di traumatizzare la pelle.

Per evitare le ulcerazioni o le lacerazioni cutanee, valutare la pelle e le condizioni mediche del paziente prima dell'applicazione.

Monopaziente. Monouso

Per un video illustrante l'applicazione, visitare [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il fornitore ospedaliero/sanitario preferito.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

