

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder








For Comfortable & Secure Stabilization

BreezeLock® Στήριγμα ενδοτραχειακού σωλήνα

Κατάλληλο για ενδοτραχειακούς σωλήνες 7,0- 10,0 mm
Περιεχόμενα: 1 από έναστος - περιλαίμιο, αυτοκόλλητη βάση 273, ρολό ταινίας

Οδηγίες εφαρμογής

1. Καθαρίστε τον σωλήνα. Αφήστε τον να στεγνώσει.
2. Εφαρμόστε την αυτοκόλλητη βάση. (A) Ακολούθηστε τις οδηγίες στη συσκευασία 273.
3. Πιέστε το περιλαίμιο πάνω στην τραχιά περιοχή της αυτοκόλλητης βάσης, φροντίζοντας ώστε η PAFA να είναι κεντραρισμένη πάνω από το στόμα του ασθενούς. (B)
4. Ανοίξτε τις γλωττίδες ασφαλίσης που υπάρχουν στα δύο άκρα του περιλαΐμιου και τυλίξτε το περιλαίμιο γύρω από το κεφάλι, ακριβώς κάτω από τα αυτιά. Στερεώστε τις γλωττίδες ασφαλίσης στην εξωτερική πλευρά του περιλαΐμιου.
5. Ανασηκώστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ DALE. Τοποθετήστε το ΚΑΝΑΛΙ πάνω στον ενδοτραχειακό σωλήνα. Πιέστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ DALE στη PAFA και στο περιλαίμιο για να το ασφαλίσετε στη θέση του.
6. Βήματα στερέωσης του σωλήνα στο ΚΑΝΑΛΙ με ταινία:
 - με τον σωλήνα να κρέμεται ελεύθερα κάτω από το ΚΑΝΑΛΙ, τυλίξτε ένα κομμάτι 15 cm από την παρεχόμενη ταινία 1 φορά γύρω από τον σωλήνα. (C)
 - Πιέστε το ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ προς τα κάτω, πάνω στον ενδοτραχειακό σωλήνα.
 - Τυλίξτε καλά την ταινία με σπειροειδή κίνηση γύρω από τον σωλήνα και το ΚΑΝΑΛΙ. (D)
 - Προαιρετικό: Συνεχίστε να τυλίγεται την ταινία γύρω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα κατά τουλάχιστον 2,5 cm πέρα από την άκρη του ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.
7. Βεβαιωθείτε ότι το περιλαίμιο έχει στερεωθεί καλά, ξαναρυθρίζοντας τις γλωττίδες ασφαλίσης όσο χρειάζεται.
 - Αλλάξτε την ταινία στο ΚΑΝΑΛΙ όποτε είναι απαραίτητο.
 - Αλλάξτε τη συσκευή μετά από 3 ημέρες ή συντομότερα, εάν χρειάζεται.
 - Για να αποφευχθεί εξέλκωση ή εκδορές του δέρματος, εκτιμήστε την κατάσταση του δέρματος του ασθενή και την ιατρική του κατάσταση πριν από την εφαρμογή. Να παρακολουθείται καθημερινά η συχνότητα.

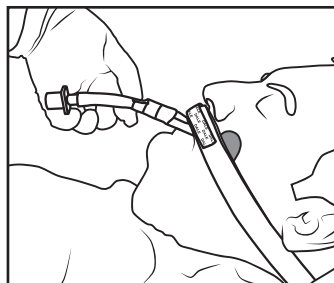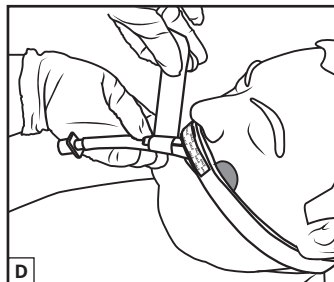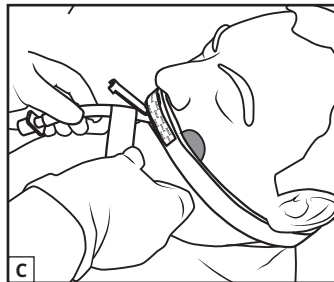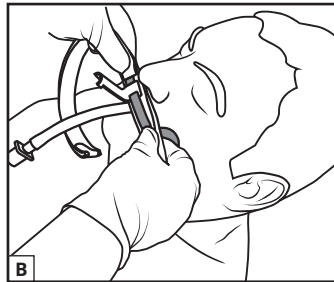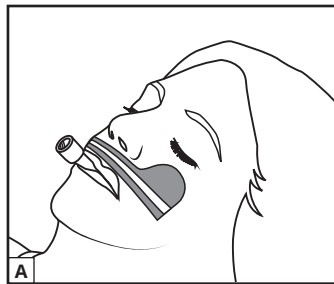

Αλλαγή θέσης του σωλήνα

Κρατώντας το τυλιγμένο με ταινία ΚΑΝΑΛΙ με το ένα χέρι, ανασηκώστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ DALE από τη PAFA. Σύρετε το ΚΑΝΑΛΙ για να μετακινήσετε τον σωλήνα στην επιθυμητή θέση. Πιέστε ξανά το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ DALE πάνω στη PAFA και στο περιλαίμιο για να ασφαλίσετε τον σωλήνα στη νέα του θέση.

Αφαίρεση

Η συσκευή θα πρέπει να αφαιρείται με προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το δέρμα. Εφαρμόστε ξανά προστατευτικό δέρματος εάν πρόκειται να τοποθετηθεί άλλη συσκευή.

Η Dale **συνιστά να αλλάξετε συχνά τη θέση του ενδοτραχειακού σωλήνα** ώστε να αποτραπεί τραυματισμός των χειλιών και των υποκείμενων ιστών λόγω παρατεταμένης πίεσης.

Η Dale **συνιστά ιδιαίτερα να υποστηρίζεται ο σωλήνας αερισμού** ώστε να περιορίζεται η πίεση που ασκείται στο πρόσωπο του ασθενή.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στο ισότοπο www.dalemed.com

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Διπλόσωμο ευρεσιτεχνίας www.dalemed.com/patents

Τα Dale & BreezeLock είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)