

# Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

# Dale® Medical Products

**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
www.dalemed.com

**EC REP** **MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**CH REP** **MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

# Dale®

Medical Products

## BreezeLock® 기관 내관 홀더

기관 내관(크기 7.0~10.0 mm)에 끼워 맞춤

**내용물:** 각각 1개 - 넥밴드; 273 접착 베이스; 테이프 롤

### 적용 지침

1. 내관을 청소하십시오. 건조시키십시오.
2. 접착 베이스를 붙이십시오. (A) 273 포장에 명시된 지시를 따르십시오.
3. 넥밴드를 베이스의 폭 부분에 대고 누르고, 트랙이 반드시 환자의 입 위 중앙에 자리잡게 하십시오. (B)
4. 넥밴드의 양쪽 끝에 있는 파스너 탭을 열고 귀 바로 아래 높에서 머리를 밴드로 감싸십시오. 파스너 탭을 넥밴드의 바깥쪽에 고정시키십시오.
5. 데일 오버레이를 들어 올리십시오. 채널을 기관 내관 위에 두십시오. 데일 오버레이를 트랙과 넥밴드를 가로질러 눌러 제자리에 고정시킵니다.
6. 내관을 채널에 테이프로 감싸는 단계:
  - 내관이 채널 아래에 막힘없이 놓인 상태에서, 내관을 6" 길이의 제공된 접착 테이프로 1번 감싸십시오. (C)
  - 내관 쪽으로 배관 채널을 아래로 누르십시오.
  - 내관과 채널을 테이프로 전방으로 나선을 그리면서 단단히 감싸십시오. (D)
  - 선택: 튜빙 채널 끝을 최소한 1" 너머 테이프를 감싸십시오.
7. 필요한 경우 파스너 탭을 재조정하여 넥밴드를 확실하게 고정시키십시오.
  - 필요한 경우 채널에 있는 테이프를 바꾸십시오.
  - 3일 후에, 또는 필요하면 더 빨리 장치를 바꾸십시오.
  - 피부 궤양 또는 피부 열상을 방지하기 위해, 적용하기 전에 환자 피부 및 의학적 병태를 평가하십시오. 매일 또는 더 자주 모니터링을 하십시오.

### 내관 위치복원

테이프를 감싼 채널을 한손으로 잡은 상태에서, 데일 오버레이를 트랙에서 들어 올리십시오. 채널을 미끄러뜨려 내관을 원하는 위치로 이동시킵니다. 데일 오버레이를 트랙과 넥밴드 쪽으로 도로 아래로 눌러 내관의 위치를 제자리에 고정시킵니다.

### 제거

피부 외상을 방지하기 위해 장치를 주의하여 제거해야 합니다. 또 다른 장치를 적용해야 하는 경우 피부용 제제를 다시 도포하십시오.

누그러지지 않는 압력으로 인해 인술과 피하 조직에 상처가 나는 것을 방지하는 데 도움이 되도록 기관 내관의 위치복원을 자주 하기를 권장합니다.

환자 안면을 누르는 압력을 줄이기 위해 인공호흡기 튜빙을 떠받치도록 강력히 권장합니다.

단일 환자용. 1회용.

도포 시연 영상을 보시려면, [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)을 방문하십시오.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

특히 [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale 및 BreezeLock은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.

