

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

BreezeLock® Holder for Tracheal tube

passer til trakealtuber i størrelse 7,0–10,0 mm

Innhold: 1 stk. av hver: nakkerem, 273-klebeplate, teiprull

Påsettingsanvisninger

1. Rengjør tuben. La tørke.
2. Sett på klebeplaten (A). Følg anvisningene på 273-pakningen.
3. Trykk nakkeremmen inn på den delen av klebeplaten som har festekroker, og påse at SKINNEN er midtstilt ovenfor pasientens munn. (B)
4. Åpne festeflikene i begge ender av nakkeremmen, og legg nakkeremmen rundt hodet, rett nedenfor ørene. Fest festeflikene til utsiden av nakkeremmen.
5. Løft DALE-OVERLEGGSPLATEN. Posisjoner KANALEN over trakealtuben. Trykk DALE-OVERLEGGSPLATEN over SKINNEN og nakkeremmen for å feste den.
6. Fremgangsmåte for å teipe tuben til KANALEN:
 - La tuben ligge fritt nedenfor KANALEN, og vikle 15 cm av den medfølgende teipen én gang rundt tuben. (C)
 - Trykk TUBEKANALEN ned og inn på tuben.
 - Vikle teip godt fast rundt tuben og KANALEN med spiralbevegelser forover. (D)
 - Valgfritt: Vikle teip minst 2,5 cm forbi TUBEKANALES avslutning.
7. Påse at nakkeremmen sitter godt ved å justere festeflikene på nytt etter behov.
 - Bytt teip på KANALEN etter behov.
 - Bytt enheten etter tre dager, eller tidligere ved behov.
 - Forebygg sår og rifter i huden ved å evaluere pasientens hud og helsestand før påsetting. Overvåk daglig eller oftere.

Justere Tubens Posisjon

Hold den teipede KANALEN med den ene hånden, og løft DALE-OVERLEGGSPLATEN opp fra SKINNEN. Skyv KANALEN for å flytte tuben til ønsket sted. Trykk DALE-OVERLEGGSPLATEN ned på SKINNEN og nakkeremmen igjen for å feste tuben.

Fjerne Enheten

Enheten skal fjernes forsiktig for å unngå hudtraume. Påfør hudprepareringsmiddel på nytt hvis en ny enhet skal settes på.

Dale anbefaler å justere trakealtubens posisjon ofte for å forebygge trykkskader på lepper og underliggende vev.

Dale anbefaler på det sterkeste å støtte opp ventilasjonstuben for å redusere trykket mot pasientens ansikt.

Til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Produsert uten naturgummilateks.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale & BreezeLock er registrerte varemerker for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

