

Hold-n-Place[®] Supporto per Catetere di Foley

Applicazione del Cosciale

 Posizionare la fascia per gambe sotto e in alto intorno alla coscia del paziente, con l'etichetta del prodotto Dale rivolta verso l'interno della gamba. Allungare la fascia da entrambi i lati in modo uniforme e fissare la linguetta a gancio. La compressione corretta è stata ottenuta quando due dia entrano comodamente sotto la fascia.




2. Disporre il catetere Foley sopra la cucitura bianca della linguetta verde. Formare un'ampia ansa con il catetere, al di sopra del cosciale, per evitare la trazione sulla vescica; oppure tendere il catetere per ottenere la trazione eventualmente richiesta.
3. Una volta posto il catetere nella posizione desiderata, inserire la

linguetta verde sottile sopra il catetere e attraverso l'apertura



- quadrata, in modo da sovrapporre le linguette verdi.

 Bloccare il catetere tirando le linguette verdi in direzioni opposte e fissandole in posizione. Per riposizionare il catetere, sollevare una delle due linguette verdi, regolare il catetere e riallacciare la linguetta stessa.
- 4

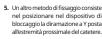



Applicazione della Cintura in Vita

- Per fissare saldamente il catetere in posizione, fare passare la cintura attorno all'addome, sopor il sito della ferita. Non è necessario radere. La linguetta verde di bloccaggio del catetere dev'essere centrata rispetto al sito di drenaggio. Una volta posizionato il supporto, premere la linguetta di bloccaggio contro la cintura.
 Disporre il catetere sopra la cucitura bianca della linguetta verde.
- 2. Disporte il catetere sopra la cucitura biarica della liriguetta verde
- 3. Ripetere i precedenti passi 3, 4 e 5.

Ulteriori Vantaggi

Per aiutare a prevenire l'irritazione meatale, il cosciale può essere fatto ruotare in entrambe le direzioni. Alternando periodicamente le gambe è inoltre possibile aumentare il comfort del paziente

Monopaziente. Monouso

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il fornitore ospedaliero/sanitario preferito. Non contiene lattice di gomma naturale.

Non contiene lattice di gomma natui

Dale e Hold-n-Place sono marchi registrati di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.





Dale Medical Products, Inc. 40 Kenwood Circle • Suite 7

Franklin, MA 02038-3298, USA T: +1-508-695-9316 www.dalemed.com



MDSS GmbH Schiffgraben

