

## Supporto per Tampone Nasale

## Istruzioni per l'Applicazione

- Centrare la sezione in plastica del supporto sul tampone nasale e sotto il naso del paziente. Fissare il supporto in posizione facendone passare le anse dietro le orecchie.
- 2. Per regolare la misura (dall'orecchio al naso)
  - a. Sollevare l'estremità del nastro e riposizionare l'ansa fino ad ottenere la distanza desiderata. Ripetere sull'altro lato.
  - b. Piegare l'estremità del nastro sopra l'ansa. Il nastro in eccesso può essere accorciato con le forbici.







## Cambio del Tampone Nasale

Per cambiare tampone, liberare un orecchio dall'ansa, cambiare tampone e far passare di nuovo l'ansa dietro l'orecchio del paziente.

Monopaziente. Monouso

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il fornitore ospedaliero/sanitario preferito.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.





## **Dale Medical Products, Inc.** 40 Kenwood Circle • Suite 7

Franklin, MA 02038-3298, USA T: +1-508-695-9316 www.dalemed.com





D-30175 Hannover, Germany



