


Διαχωριστής ενδοφλέβιων (ΕΦ) γραμμών

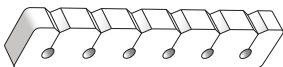


Για τον διαχωρισμό και τη διευθέτηση πολλαπλών ΕΦ γραμμών (έως 6) που συνδέονται σε έναν ασθενή.

Οδηγίες χρήσης

Διαμόρφωση μίας συσκευής

1. Τοποθετήστε κάθε ΕΦ γραμμή στην αντίστοιχη υποδοχή, μία-μία.
2. Βεβαιωθείτε ότι κανένας σωλήνας δεν έχει τσακίσματα ή συστροφές.
3. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή:

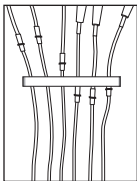


- Αναρτημένη στις ΕΦ γραμμές.
- Οριζόντια στην κλίνη του ασθενούς.

Διαμόρφωση πολλαπλών συσκευών

1. Χρησιμοποιήστε έως τρεις διαχωριστές ΕΦ γραμμών στις ακόλουθες θέσεις:

- Κάτω από την αντλία έγχυσης. (Εγγύς)
- Στο μέσον των ΕΦ γραμμών. (Ενδιάμεσα)
- Δίπλα στη χαμηλότερη θύρα έγχυσης κοντά στον ασθενή. (Περιφερικά)

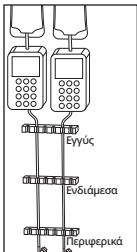

2. Τοποθετήστε κάθε σωλήνα στην αντίστοιχη υποδοχή κάθε επιμέρους συσκευής.
3. Ελέγξτε όλους τους σωλήνες για τσακίσματα ή στρεβλώσεις μετά την τοποθέτηση.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Γνωστοποίηση για τον χρήστη ή/και τον ασθενή: κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το παρόν τεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας www.dalemed.com/patents

Το Dale είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ην. Βασίλειο.



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

