


Organizzatore per Linee IV

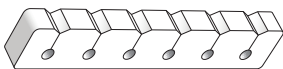


Destinato a separare e organizzare un massimo di 6 linee collegate allo stesso paziente.

Istruzioni per l'Uso

Impostazione per Dispositivo Singolo

1. Inserire uno alla volta ciascun tubo IV nell'apposito alloggiamento.
2. Controllare che ciascun tubo sia privo di torciture o piegature.
3. È possibile posizionare il dispositivo:

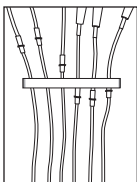


- Appendendolo al tubo IV.
- Appoggiandolo in piano sul letto del paziente.

Impostazione per Più Dispositivi

1. Usare un massimo di tre organizzatori per linee IV, collocandoli nelle seguenti posizioni:

- Sotto la pompa per infusione (Prossimale)
- A metà distanza lungo il tubo IV (Intermedia)
- Presso la porta inferiore per iniezioni accanto al paziente (Distale)

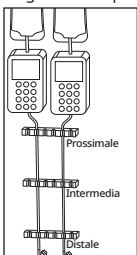

2. Inserire ciascun tubo nell'apposito alloggiamento di ciascun dispositivo.
3. Controllare che ciascun tubo sia privo di torciture o piegature dopo l'inserimento.

Monopaziente. Monouso.

Avviso per gli utenti e/o pazienti: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere relazionato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale abbia sede detto utente e/o paziente.

Brevetto www.dalemed.com/patents

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e nel Regno Unito.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

