

## Postoperativni Kompresijski Grudnjak

### Upute za Primjenu

1. Odvojite naramenice i postavite grudnjak pod bolesnicu.
2. Pozicionirajte grudnjak tako da su gornja i donja ljepljiva traka postavljene na sredinu grudnog koša. Gornju i donju ljepljivu traku čvrsto stisnite jednu na drugu da sigurno i ugodno prijanja.
3. Naramenice pričvrstite na vrhovima prema prednjem dijelu grudnjaka.
4. Za dodatno podešavanje nježno razdvojite i ponovo spojite ljepljive trake na ramenima.
5. Da biste pričvrstili drenažnu bočicu otvorite traku za pričvršćivanje, provucite je kroz džepić bočice i stisnite da biste je pričvrstili.

### Alternativna Primjena

Dale postoperativni kompresijski grudnjak može se postaviti bez razdvajanja naramenica nježnim provlačenjem ruku bolesnice kroz naramenice.

### Pranje i održavanje

 Prati u toploj vodi.

 Sušiti na zraku.

 Ne izbjeljivati.

 Ne peglati.

 Ne čistiti kemijski.

Za uporabu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Video s uputama za primjenu nalazi se na [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Ne sadrži prirodni gumeni lateks.

Napomena korisniku i/ili bolesniku: svaki ozbiljan incident koji se dogodi povezano s ovom napravom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj je korisnik i/ili bolesnik registriran ili rezident.

Dale je registrirani žig tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU-u i UK-u

