

Postoperativ Kompressions-BH

Brugsanvisning

1. Løsn stropperne, og anbring BH'en under patienten.
2. Anbring BH'en, så burrebåndet sidder midt over brystet. Tryk burrebåndet godt sammen, så BH'en sidder tæt og behageligt.
3. Sæt stropperne fast øverst på båndet foran på BH'en.
4. Hvis der er behov for yderligere tilpasning, kan burrebåndene over skuldrene forsigtigt åbnes og lukkes igen.
5. Drænageblæreerne fastgøres ved at åbne fligen, føre fligen gennem blærens løkke og trykke fligen fast igen.

Anden Påføringsmetode

Dale postoperativ kompressions-BH kan også påføres uden at løse stropperne ved, at man forsigtigt fører patientens arme gennem stropperne.

Vask og Pleje






 Maskinvaskes i varmt vand.

 Lufttørres.

 Må ikke bleges.

 Må ikke stryges.

 Må ikke renses kemisk.

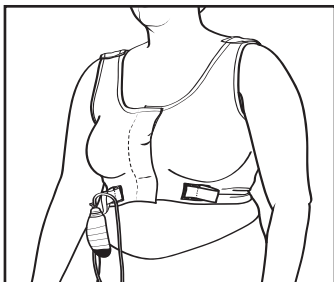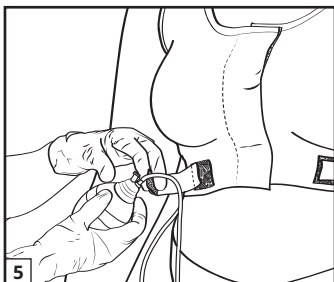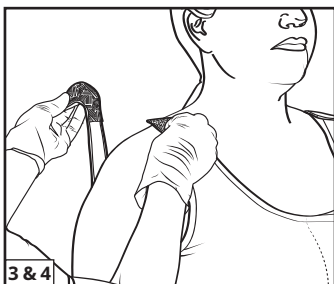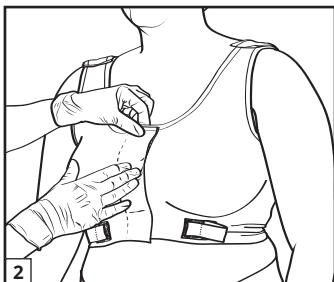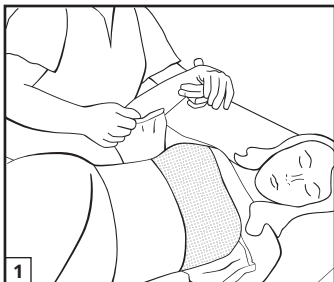

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser påføringen, på www.dalemed.com.

Fremstillet uden naturgummilætex.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Enhver alvorlig hændelse, der måtte opstå i forbindelse med dette udstyr, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

Dale er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.