

Postoperatieve Compressiebeha

Instructies voor het Aanbrengen

1. Maak de banden los en leg de beha onder de patiënt.
2. Plaats de beha zodanig dat de klittenbandsluiting zich in het midden van de borstkas bevindt. Druk de klittenbandsluiting stevig aan voor een goede, comfortabele pasvorm.
3. Bevestig de banden aan de voorkant van de beha bovenaan.
4. Voor verdere afstelling maakt u de klittenbandsluiting op de schouders voorzichtig los en zet u deze weer vast.
5. Om een drainageballon te bevestigen, opent u het betreffende lipje, schuift u het door de mof van de ballon en drukt u het goed aan.

Op Andere Manier Aanbrengen

De postoperatieve compressiebeha van Dale kan ook worden aangebracht zonder de banden los te maken, en wel door de armen van de patiënt voorzichtig door de banden te leiden.

Wassen en Onderhoud

 Warm wassen in de machine.

 Aan de lijn drogen.

 Geen bleekmiddel gebruiken.

 Niet strijken.

 Niet chemisch reinigen.

Voor gebruik bij één patiënt. Wegwerpbaar.

Een videofilmje over het aanbrengen van de beha vindt u op www.dalemed.com

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Kennisgeving aan de gebruiker en/of patiënt: elk ernstig incident dat zich met dit hulpmiddel voordoet, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Dale is een gedeponiseerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk

