

Leikkauksen Jälkeiseen Käyttöön Tarkoitettu Kompressorintaliivit

Käyttöohjeet

1. Irrota olkaimet ja aseta rintaliivit potilaan alle.
2. Aseta rintaliivit niin, että tarranauhakiinnittimet ovat keskellä rintakehää. Paina tarranauhakiinnittimet lujasti kiinni niin, että rintaliivit pysyvät tukevasti ja mukavasti paikoillaan.
3. Kiinnitä olkaimet rintaliivien etupuolelle niiden yläosan nauhaan.
4. Jos haluat tehdä lisäsäätöjä, avaa ja kiinnitä varovasti olkapäiden tarranauhakiinnittimet.
5. Kiinnitä drenipallot avaamalla kieleke, pujottamalla kieleke pallon holkin läpi ja painamalla sitten kiinni.

Vaihtoehtoinen Pukemistapa

Leikkauksen jälkeiseen käyttöön tarkoitetut Dale-kompressorintaliivit voidaan pukea olkaimia irrottamatta pujottamalla potilaan käsivarret varovasti olkaimien läpi.

Pesu ja Hoito

-  Konepesu lämpimällä vedellä.
-  Kuivatus narulla.
-  Ei saa käyttää valkaisuaineita.
-  Ei saa silittää.
-  Ei kemiallista pesua.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Käytössä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

Käyttäjälle ja/tai potilaalle tarkoitettu tieto siitä, että laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

Dale on Dale Medical Products Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

