

Soutien-gorge de Compression Post-Chirurgical

Instructions pour l'Application

1. Détachez les bretelles et placez le soutien-gorge au-dessous de la patiente.
2. Positionnez le soutien-gorge de telle manière que les attaches auto-agrippantes soient centrées sur la poitrine. Appuyez fermement sur les attaches auto-agrippantes pour assurer un ajustement sécurisé et confortable.
3. Attachez les bretelles sur le devant du soutien-gorge, en haut de la bande.
4. Pour effectuer des ajustements supplémentaires, ouvrez et refermez délicatement la fermeture auto-agrippante sur les épaules.
5. Pour sécuriser les pochettes de drainage, ouvrez la languette, faites glisser la languette à travers le manchon de la pochette et appuyez pour sécuriser.

Autre Méthode d'Application Possible

Le soutien-gorge de compression post-chirurgical Dale peut également être appliqué sans détacher les bretelles en guidant délicatement les bras de la patiente à travers les bretelles.

Lavage et Entretien



Lavez en machine à chaud.



Suspendez sur une corde à linge pour sécher.



Ne javellisez pas.



Ne repassez pas.



Ne nettoyez pas à sec.

Pour utilisation par une seule patiente. Jetable.

Pour regarder une vidéo sur l'application, veuillez visiter www.dalemed.com

Fabriqués sans latex de caoutchouc naturel.

Avis à l'utilisatrice et/ou à la patiente : tout incident grave survenu en relation avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre à l'endroit où l'utilisatrice et/ou la patiente se trouve(nt).

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U., dans l'UE et au R.-U

