

Postoperativer Kompressions-BH

Anwendungshinweise

1. Träger abnehmen und BH unter die Patientin legen.
2. BH so positionieren, dass die Klettverschlüsse über der Brust zentriert sind. Klettverschlüsse fest andrücken, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten.
3. Träger oben am Band an der Vorderseite des BHs befestigen.
4. Weitere Anpassungen können durch vorsichtiges Öffnen und erneutes Befestigen des Klettverschlusses an den Schultern vorgenommen werden.
5. Zum Befestigen der Drainagebeutel die Lasche öffnen, durch die Hülse des Beutels schieben und fest andrücken.

Alternative Anwendung

Der postoperative Kompressions-BH von Dale kann auch ohne Abnehmen der Träger angelegt werden, indem die Arme der Patientin vorsichtig durch die Träger geführt werden.

Waschen und Pflege

 Maschinenwäsche warm.

 Auf der Leine trocknen.

 Nicht bleichen.

 Nicht bügeln.

 Nicht chemisch reinigen

Für den Gebrauch an einer einzelnen Patientin.
Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter
www.dalemed.com

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

Hinweis für den Anwender und/oder die Patientin: Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit diesem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder die Patientin ansässig ist, zu melden.

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien

