
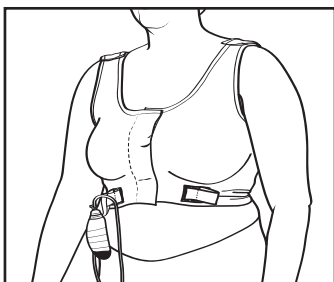
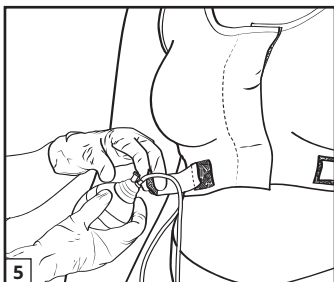
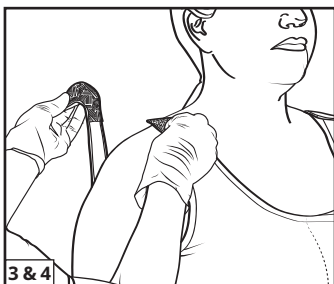
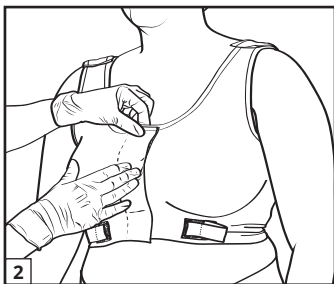


Μετεγχειρητικός Στηθόδεσμος Συμπίεσης

Οδηγίες εφαρμογής

1. Ανοίξτε τις τιράντες και τοποθετήστε τον στηθόδεσμο κάτω από την ασθενή.
2. Τοποθετήστε τον στηθόδεσμο έτσι ώστε τα αυτοκόλλητα κλεισίματα να βρίσκονται στο κέντρο του στέρνους. Πιέστε καλά τα αυτοκόλλητα κλεισίματα ώστε να εξασφαλίσετε σταθερή και άνετη εφαρμογή.
3. Στερεώστε τις τιράντες μπροστά, στο επάνω μέρος της φάσας του στηθόδεσμου.
4. Για περαιτέρω προσαρμογή, ανοίξτε προσεκτικά και ξανακολλήστε το αυτοκόλλητο κλείσιμο στους ώμους.
5. Για να στερεώσετε τους συλλέκτες παροχετεύσεων, ανοίξτε τη γλωττίδα, περάστε την μέσα από τη θηλιά του συλλέκτη και πιέστε για να ασφαλίσει.

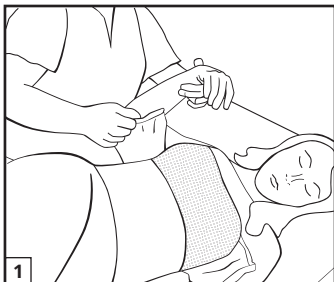

Εναλλακτική Εφαρμογή

Ο μετεγχειρητικός στηθόδεσμος συμπίεσης της Dale μπορεί επίσης να εφαρμοστεί χωρίς να ανοίξετε τις τιράντες, περνώντας προσεκτικά τους βραχίονες της ασθενούς μέσα από τις τιράντες.

Πλύσιμο και Φροντίδα

 Πλένεται στο πλυντήριο με χλιαρό νερό.

 Κρεμάστε το για να στεγνώσει.

 Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

 Μη σιδερώνετε.

 Μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Γνωστοποίηση για τον χρήστη ή/και τον ασθενή: κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το παρόν τεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Το Dale είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ην. Βασίλειο