

Post-Chirurgico Reggiseno a Compressione

Istruzioni Per l'Applicazione

1. Staccare le cinghiette e collocare il reggiseno sotto la paziente.
2. Disporre il reggiseno centrando sul petto le chiusure a ganci e anelli. Premere saldamente la sezione a ganci contro quella ad anelli così da garantire la comodità e sicurezza della chiusura.
3. Disporre le cinghiette sulla parte anteriore del reggiseno, sopra la fascia.
4. Per migliorare la vestibilità, aprire e poi riallacciare delicatamente la chiusura a ganci e anelli in corrispondenza alle spalle.
5. Per montare bulbi da drenaggio, aprire la linguetta, farla passare attraverso la manica del bulbo e premere il tutto per fissarlo saldamente.

Applicazione Alternativa

Il reggiseno post-chirurgico a compressione Dale può essere applicato senza staccare le cinghiette, guidando direttamente le braccia della paziente attraverso le maniche.

Lavaggio e Cura

 Lavaggio a macchina con acqua calda.

 Stendere per asciugare.

 Non usare candeggina.

 Non stirare.

 Non pulire a secco.

Per uso singolo. Smaltibile.

Visitare www.dalemed.com per un video dimostrativo.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Avviso per gli utenti e/o pazienti: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere relazionato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale abbia sede detto utente e/o paziente.

Dale è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e nel Regno Unito.

