

術後 用圧縮ブラジャー

使用方法

1. ストラップを外し、ブラジャーを患者の下に敷きます。
2. ブラジャーは、面ファスナーが胸の中心に来るように着用します。サポートし、快適にフィットするよう面ファスナーをしっかりと押さえます。
3. ストラップをバンド上部、ブラジャーの前側に取り付けます。
4. さらに調整する場合は、肩にある面ファスナーをそっと外し止め直します。
5. 排液バルブを固定するには、タブを開き、バルブのスリーブにタブを通して、押さえます。

代替の使用方法

Dale社の術後用圧縮ブラジャーは、ストラップを外さず、無理なく患者の腕をストラップに通して着用することもできます。

洗濯・取扱方法

 洗濯機洗い 中温。

 吊り干し。

 漂白剤使用不可。

 アイロン使用不可。

 ドライクリーニング不可。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオはwww.dalemed.comでご覧になれます

天然ゴムラテックスは含まれていません。

使用者／患者への通知。本デバイスに関連して発生したいかなる重大な事故も、製造会社及び使用者／患者を管轄対象とする加盟国の所轄官庁に報告すること。

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。

