



수술 후 압축 브라

적용 지침

1. 어깨 끈을 분리하고 브라를 환자 아래에 놓아두십시오.
2. 찌꺼기 부위가 가슴 중앙에 오도록 브라를 위치시킵니다. 안정감 있고 편안하게 꼭 맞도록 찌꺼기 부위를 단단히 누르십시오.
3. 어깨 끈을 밴드 상단에서 브라 앞면에 부착하십시오.
4. 추가 조정을 위해, 어깨 부분의 찌꺼기 부위를 살며시 열고 다시 잠그십시오.
5. 배액 주머니를 고정시키기 위해, 탭을 열고, 탭을 배액 주머니의 슬리브를 통해 밀어 넣고 눌러 고정시키십시오.

다른 착용 방법

Dale 수술 후 압박 브라는 어깨 끈을 분리하지 않고 환자의 팔을 어깨 끈을 통해 살며시 빠져나가게 하여서도 착용할 수 있습니다.

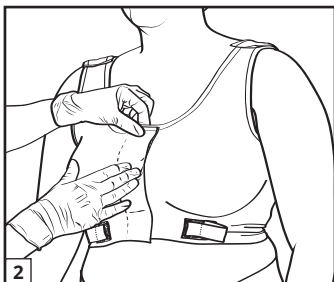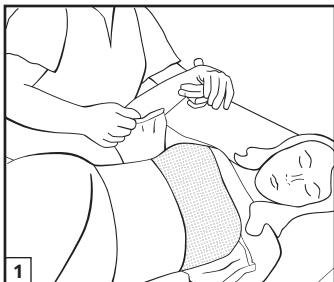

세탁 및 관리


세탁기를 사용하여 온수로 세탁하십시오.

자연 건조하십시오.

표백하지 마십시오.

다림질하지 마십시오.

드라이클리닝하지 마십시오.

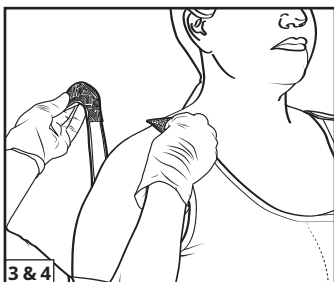

1인 환자 전용. 1회용.

착용 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

사용자 및/또는 환자 고지 사항: 이 기기와 관련하여 발생한 심각한 사고는 제조업체에 그리고 사용자 및/또는 환자가 정착한 회원국의 관할 당국에 보고해야 합니다.

Dale은 미국, 유럽 연합 및 영국에서 Dale Medical Products Inc.의 등록 상표입니다

