

## Postkirurgisk Kompresjons-BH

### Påsettingsanvisninger

1. Løsne stroppene, og legg BH-en under pasienten.
2. Posisjoner BH-en slik at borrelåsen midtstilles over brystkassen. Trykk godt på borrelåsen for å sikre en trygg, komfortabel passform.
3. Fest stroppene til forsiden av BH-en, øverst på stoffremmen.
4. Ytterligere justeringer foretas ved å åpne og lukke borrelåsene på skuldrene forsiktig.
5. Fest dren ved å åpne festefliken, stikke festefliken gjennom drenets hylse og trykke for å feste drenet.

### Alternativ Anvendelse

Den postkirurgiske kompresjons-BH-en fra Dale kan også settes på uten å løsne stroppene, ved å føre pasientens armer varsomt gjennom stroppene.

### Vask og Stell



Maskinvaskes i varmt vann.



Lufttørkes.



Unngå blekemidler.



Skal ikke strykes.



Skal ikke renses.

Til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Produsert uten naturgummilateks.

Merknad til brukeren og/eller pasienten: Alle alvorlige uønskede hendelser som har oppstått i forbindelse med dette utstyret, skal meldes til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Dale er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

