

Pooperacyjny Stanik Uciskowy

Instrukcja Zakładania

1. Odpiąć paski i umieścić stanik pod pacjentką.
2. Stanik umieścić tak, aby rzepty były wyśrodkowane na klatce piersiowej. Mocno ścisnąć rzepty, aby zapewnić dobre i wygodne dopasowanie.
3. Zamocować paski z przodu stanika w górnej części opaski.
4. W celu lepszego dopasowania delikatnie odpiąć i ponownie zapiąć rzepty na ramionach.
5. W celu zamocowania kolbek drenażowych otworzyć wypustkę, wsunąć ją przez rękaw kolbki i zaciśnąć.

Alternatywny Sposób Aakładania

Pooperacyjny stanik uciskowy Dale można również założyć bez odpinania pasków, poprzez delikatne nakierowywanie przełożenia ramion pacjentki przez paski.

Pranie i Dbalność



Prać w pralce w ciepłej wodzie.



Rozwiesić w celu wysuszenia.



Nie używać wybielaczy.



Nie prasować.



Nie czyścić chemicznie.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku.

Wideo z instrukcją zakładania dostępne jest na stronie www.dalemed.com

Nie zawiera lateksu naturalnego.

Powiadomienie dla użytkownika i/lub pacjenta; jakiegokolwiek ciężkie zdarzenie, które wystąpi w związku z tym wyrobem należy zgłosić do producenta i właściwego organu kraju członkowskiego, na terenie którego użytkownik i/lub pacjent ma swoją siedzibę.

Dale jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dale Medical Products, Inc. w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii.

