

Pós-Cirúrgico Sutiã de Compressão

Instruções de Aplicação

1. Desprenda as alças e coloque o sutiã sob a paciente.
2. Posicione o sutiã de modo que os fechos de contato fiquem centralizados sobre o tórax. Pressione-os firmemente para garantir um ajuste seguro e confortável.
3. Prenda as alças na parte frontal do sutiã, no topo da faixa.
4. Para novos ajustes, abra suavemente e feche novamente os fechos de contato nos ombros.
5. Para prender os reservatórios de drenagem, abra a aba, passe-a pela manga do reservatório e pressione para fixar.

Aplicação Alternativa

O sutiã de compressão pós-cirúrgico da Dale também pode ser aplicado sem desprender as alças, guiando cuidadosamente os braços da paciente pelas alças.

Lavagem e Cuidados



Lavar à máquina com água morna.



Deixar secar pendurado.



Não usar alvejante.



Não passar a ferro.



Não lavar a seco.

Para uso por um único paciente. Descartável.

Para assistir a um vídeo de aplicação, visite www.dalemed.com

Não fabricado com látex de borracha natural.

Aviso ao usuário e/ou paciente: qualquer incidente grave relacionado a este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o usuário e/ou paciente reside.

Dale é uma marca registrada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido.

