

Postquirúrgico Sostén de Compresión

Instrucciones de Aplicación

1. Desprenda los tirantes y coloque el sostén debajo de la paciente.
2. Coloque el sostén de modo que los cierres de gancho y bucle estén centrados sobre el tórax. Junte firmemente los cierres para que la prenda quede fija y cómoda.
3. Conecte los tirantes a la parte delantera del sostén en la parte superior de la banda.
4. Para hacer más ajustes, abra y vuelva a abrochar con suavidad el cierre de gancho y bucle de los hombros.
5. Para fijar la perita de drenaje, abra la lengüeta, pase la lengüeta a través de la funda de la perita, y haga presión para fijar el dispositivo.

Colocación Alternativa

El sostén de compresión postquirúrgico Dale también se puede poner sin desprender los tirantes; para ello, guíe con cuidado los brazos de la paciente a través de los tirantes.

Lavado y Cuidados



Lavar a máquina con agua tibia.



Secar colgado en tendedero.



No usar lejía.



No planchar.



No limpiar en seco.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar el producto, visite www.dalemed.com

Fabricado sin látex de goma natural.

Aviso para la usuaria o paciente: todo incidente grave que ocurra con este producto debe reportarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro de residencia de la usuaria o paciente.

Dale es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU., la UE y el RU.

