

Postoperativ Kompressionsbehå

Appliceringsanvisningar

1. Öppna axelbanden och placera behånen under patienten.
2. Placera behånen så att kardeborreförslutningens övre och undre delar är centrerade över bröst-korgen. Tryck ihop kardeborreförslutningens övre och undre delar ordentligt så att behånen sitter säkert och bekvämt.
3. Fäst axelbanden på behåns framsida längst upp på bandet.
4. För ytterligare justeringar, öppna kardborrefästena på axlarna försiktigt och fäst dem igen.
5. För att sätta fast dränapåsar, öppna fliken, för fliken genom påshylsan och tryck fast för att säkra den.

Alternativ Appliceringsmetod

Dale postoperativ kompressionsbehå kan också appliceras utan att man öppnar axelbanden, genom att man försiktigt för patientens armar genom axelbanden.

Tvätt- och Skötselråd



Maskintvättas i varmt vatten.



Dropptorkas.



Använd inte blekmedel.



Får inte strykas.



Får inte kemtvättas.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt.

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Ej tillverkad med naturgummilätex.

Meddelande till användaren och/eller patienten: Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad.

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.

