

วิธีการใช้งาน

1. ถอดสายรัดออกแล้วจัดวางเล็ซันในไว้ใต้ตัวผู้ป่วย
2. จัดตำแหน่งเล็ซันในให้แถบตีนตุ๊กแกอยู่ตรงกลางหน้าอก กดแถบตีนตุ๊กแกให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าสวมกระชับและสบายตัว
3. ติดสายรัดเข้ากับด้านหน้าของเล็ซันในตรงส่วนบนของแถบคาด
4. หากต้องการปรับเพิ่มเติม ให้แกะและติดแถบตีนตุ๊กแกที่บริเวณใหม่อย่างเบามือ
5. ในการยึดสายระบายของเหลว ให้เปิดแถบออก สอดแถบผ่านสายท่อ แล้วกดเพื่อให้ยึดแน่น

วิธีการใช้งานทางเลือก

เล็ซันในกระับหลังการผ่าตัดของ Dale สามารถสวมโดยไม่ต้องถอดสายรัดออกได้ โดยค่อย ๆ สอดแขนของผู้ป่วยผ่านสายรัดอย่างระมัดระวัง

การซักรีดและการดูแลรักษา

-  ซักเครื่องด้วยน้ำอุ่น
-  ตากให้แห้ง
-  ห้ามใช้สารฟอกขาว
-  ห้ามรีด
-  ห้ามซักแห้ง

ใช้กับผู้ป่วยเพียงรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง
สำหรับวิดีโอแนะนำการใช้งาน โปรดดูที่ www.dalemed.com
ไม่ได้ผลิตจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ

แจ้งให้ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยทราบ : เหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ ควรรายงานให้ผู้ผลิตและหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกที่ใช้และ/หรือผู้ป่วยตั้งอยู่ทราบ

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

