

Ameliyat Sonrası Kompresyon Sütyeni

Uygulama Talimatı

1. Askıları ayırın ve sütyeni hastanın altına yerleştirin.
2. Sütyeni, cırt cırtlı bantlar göğsün ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Sütyenin sabitlenmesi ve rahat şekilde oturması için cırt cırtlı bantlara sıkıca bastırın.
3. Askıları, sütyenin önündeki bandın üstüne takın.
4. Gerekirse, omuzlardaki cırt cırtlı bandı nazıkçe açıp tekrar sabitleyerek ayarlama yapın.
5. Drenaj balonlarını sabitlemek için, şeridi açın, şeridi balonun manşonundan geçirin ve bastrarak sabitleyin.

Alternatif Uygulama

Dale Ameliyat Sonrası Kompresyon Sütyeni, askılar ayrılmadan da uygulanabilir. Bu durumda hastanın kolları nazıkçe askıların içinden geçirilerek sütyen giydirilir.

Yıkama ve Bakım

-  Ilık suda makinede yıkayın.
-  Askıda kurutun.
-  Çamaşır suyu kullanmayın.
-  Ütülemeyin.
-  Kuru temizleme yapmayın.

Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiştir. Atılabilir.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com adresini ziyaret edin.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Kullanıcıya ve/veya hastaya not: Bu ürünle ilgili bir ciddi olay yaşanması durumunda, bu olay üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın ikamet ettiği ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Dale, Dale Medical Products, Inc. firmasının ABD, AB ve Birleşik Krallıkta tescilli ticari markasıdır.

